

GluNovo® p3 CGMS

Бързо ръководство

Единица: mmol/L



Общ преглед

Елементи на p3 CGMS

Апликатор и сензор




Трансмитер

Приложение
GluNovo E2

Общ преглед

Етапи

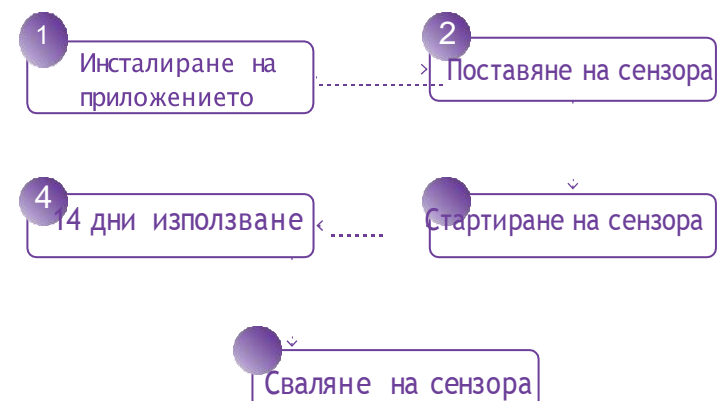

1. Инсталирайте приложението GluNovo E2



Изтеглете и инсталирайте най-новата версия на приложението GluNovo

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

2. Задайте разрешения в смартфона

- Включете Bluetooth
- Разрешете известията
- (Android) Разрешете достъп до местоположението
- (Android) Разрешете достъп до хранилището на телефона

- Вземете мерки приложението GluNovo винаги да работи и да е отворено
- Рестартирайте приложението, ако рестартирате телефона
- Не активирайте режим с ниска консумация или „не безпокойте“

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

3. Регистрирайте акаунт

Попълнете личната информация.

Приемете [Условията на ползване](#) и [политиката за защита на личните данни](#)



ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

4. Задайте гранични стойности и мерни единици

Долна

Спешна аларма за понижена стойност 3,1 mmol/L

Горна


граница 4,4 mmol/L

Горна

граница 10 mmol/L

Аларма за


повишена стойност 13,3 mmol/L

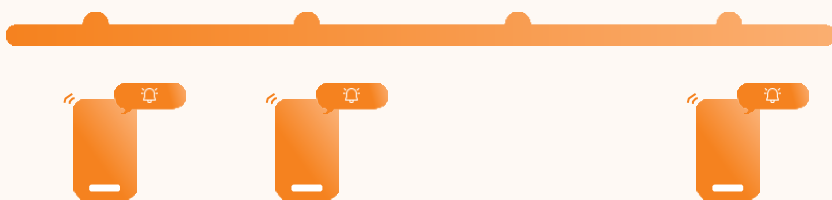

Мерни единици: mmol/L mg/dL

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

5. Изберете място на сензора

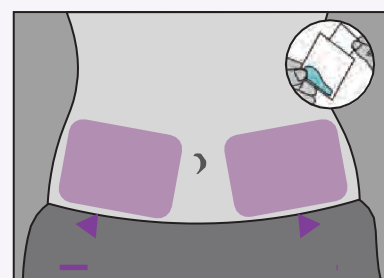


Изберете място за поставяне на сензора на корема
Почистете мястото със спиртни кърпички и оставете зоната да изсъхне изцяло

- На 5 cm от пъпа
- На 5 cm от мястото на инжектиране на инсулин
- Избягвайте местата с мастни петна, татуировки, белези
- Ако мястото е окосмено, го избърснете

Не използвайте сензора, ако опаковката му е повредена или е с изтекъл срок на годност!

Поставяне на сензора


6. Свалете защитните лепенки

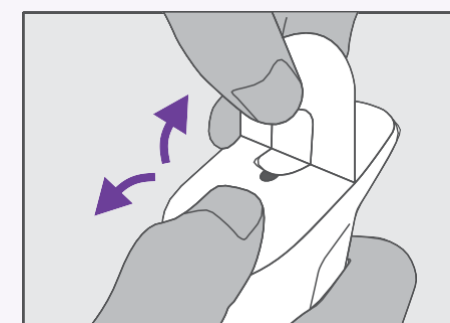

Натиснете сензора от едната страна и свалете защитните лепенки. След това свалете другата част на лепенката внимателно.

Поставяне на сензора


7. Поставете сензора

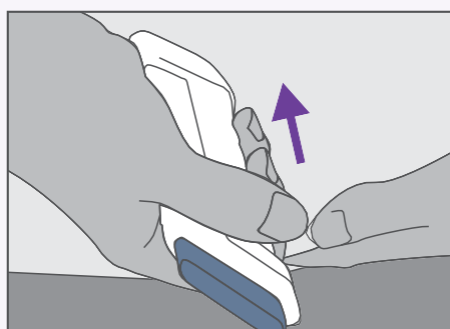

Поставете сензора хоризонтално на корема си и притиснете силно апликатора към кожата си.

Поставяне на сензора


8. Деблокирайте апликатора

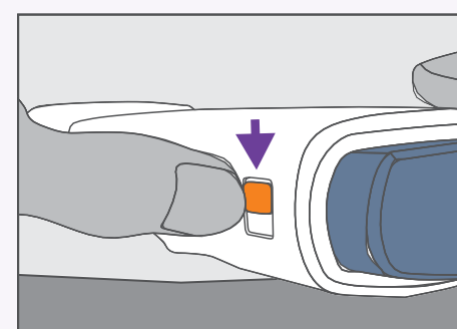

Дръжте апликатора стабилно и плъзнете бутона за блокиране от „заклучено“ в „отключено“ положение

Поставяне на сензора


9. Натиснете горния бутон

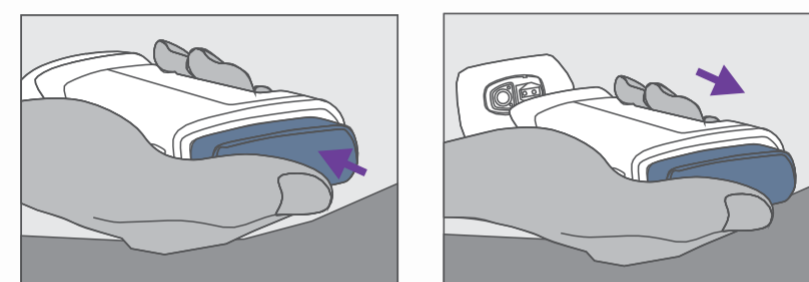

- Натиснете бутона за поставяне в горната част на апликатора.
- Може да се чуе щракване при натискането му.
- След това свалете апликатора за еднократна употреба.

Поставяне на сензора


10. Натиснете самозалепващата се лента

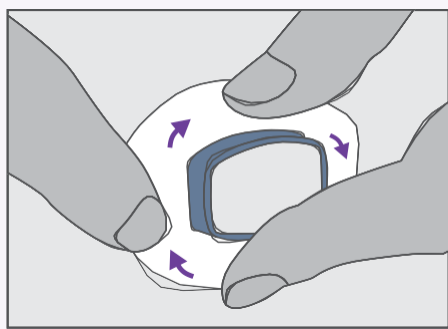


Натиснете сензора и потупайте около самозалепващата лента, за да се уверите, че е прикрепен здраво към кожата

Поставяне на сензора

11. Поставете трансмитера


- Почистете дъното на трансмитера със спиртна кърпичка и изчакайте, докато изсъхне напълно
- Проверете острата страна  и двата слота вътре

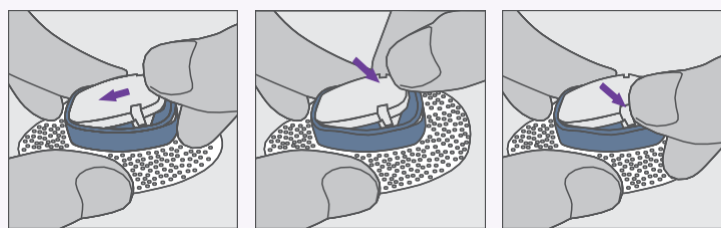

- Поставете острата страна в основата на сензора. След това натиснете единия слот в основата на сензора, докато се чуе щракване и след това натиснете другия слот, докато се чуе щракване

Поставяне на сензора


12. Сдвояване с трансмитера

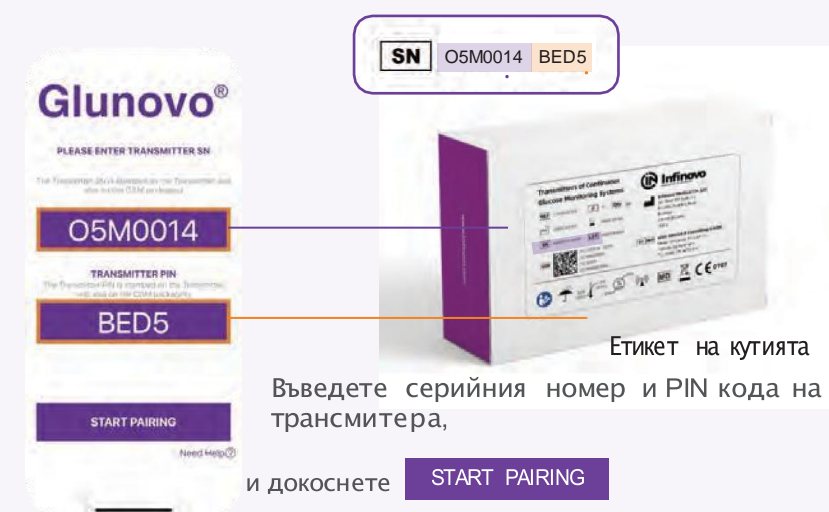

Етикет на кутията
Въведете серийния номер и PIN кода на трансмитера,
и докоснете **START PAIRING**

Стартиране на сензора


13. Стартирайте сензора

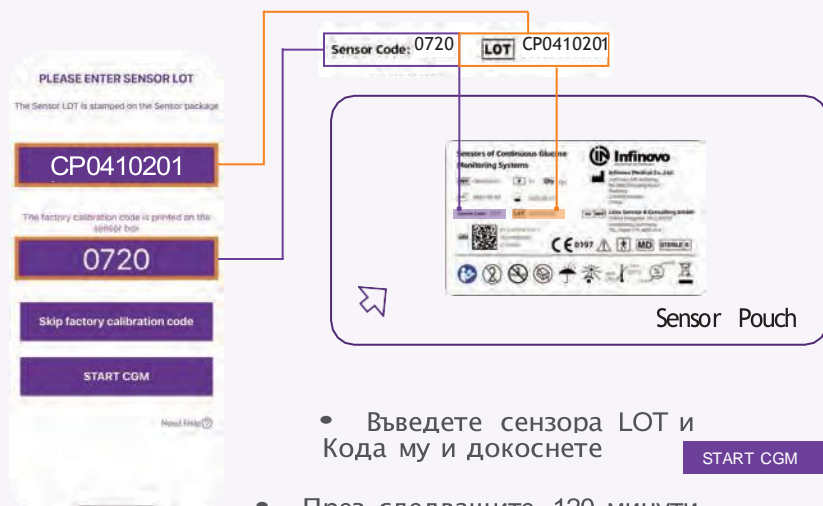

- Въведете сензора LOT и Кода му и докоснете **START CGM**
- През следващите 120 минути сензорът ще започне подгряване

Стартиране на сензора

14. Стрелки за означаване на тенденции

Икона	Значение
	Стабилна стойност
	Бавно повишаване
	Повишаване
	Бързо повишаване
	Бавно спадане
	Спадане
	Бързо спадане

Наблюдение


15. Спрете сензора от приложението



- След 14-дневно наблюдение Glun-ovo r3 CGMS ще спре автоматично.
- Можете да отстраните сензора и ръчно (начин: Path: Setting > Device information > Remove current device)
- След всяка сесия можете да експортирате данните чрез менюто за настройка.

Отстраняване на сензора


16. Отстранете сензора и трансмитера

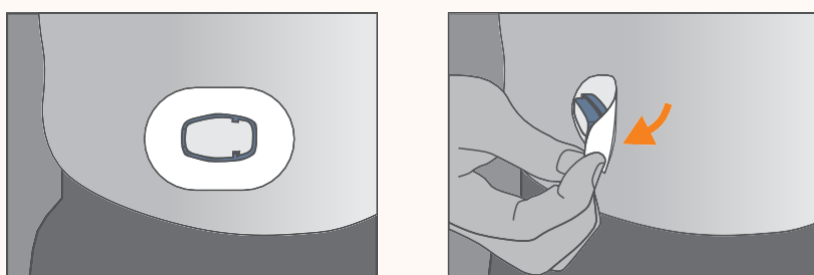

- Отстранете сензора и трансмитера **заедно** от кожата си.
- Внимателно повдигнете ръба на самозалепващата се лента от кожата и свалете сензора от едната страна към другата

Отстраняване на сензора


17. Отстранете трансмитера

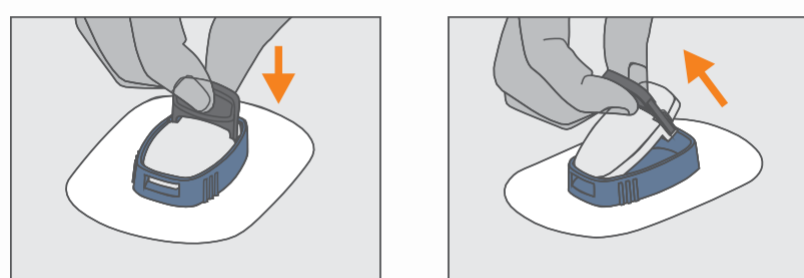

Вземете освобождаващото приспособление и го вкарайте в сензора, както е показано и след това го изтеглете, за да свалите трансмитера от сензора.

Отстраняване на сензора


18. Почистване и изхвърляне

-  →  Почистете трансмитера със спиртна кърпичка и след това го върнете в опаковката, ако няма да го използвате или го поставете към нов сензор, за да започнете нова сесия
-  →  Върнете освобождаващото приспособление в опаковката му
-  →  За безопасно изхвърляне на сензора се запознайте с местните изисквания

Отстраняване на сензора

Scan QR Code Below


To See Latest Smartphone Compatibility List

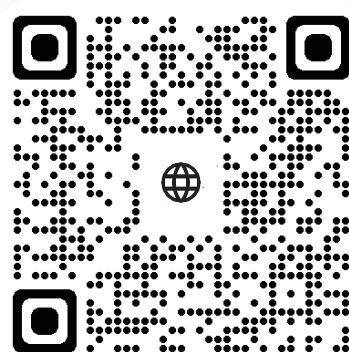

infinovo.com

Scan QR Code Below

To Login Glunovo Share Webportal

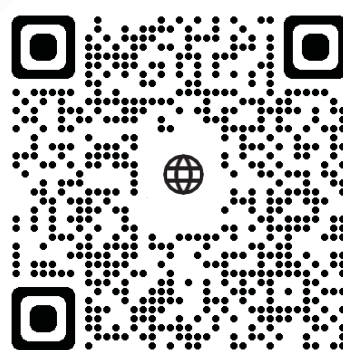

glunovoshare.com



	Infinovo Medical Co., Ltd. Infinovo Medical Co., Ltd. 3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400, Jiangsu, China
	Llins Service & Consulting GmbH Llins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany TEL: 0049 175 4870 819

Внимание: Преди използване на изделието вж. ръководството за експлоатация за подробна информация.

 www.infinovo.com/en/

 service@infinovo.com

 0197 Ver. 01
Y06002